

# PROGRAMAÇÃO


1. Selecione a função de trabalho.

- Criolipólise
- Terapia de Contraste



2. Ajuste o tempo de sessão.

- até 120 min

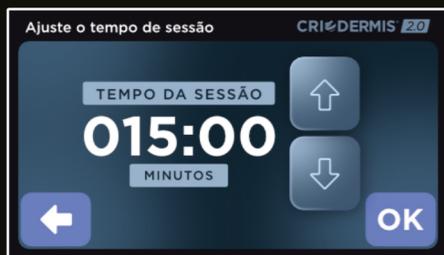

No modo de operação o Criodermis mostrará a temperatura dos aplicadores e o tempo de sessão restante. Nesta tela é possível pausar ou encerrar a sessão.



Ao finalizar a sessão basta clicar na tela para retornar ao menu inicial.

## PARÂMETROS

Tempo de aquecimento: 1-100min  
Temperatura: 38°C a 40°C  
Tempo de resfriamento: 1-120min  
Temperatura: -5°C  
Uso corporal: adiposidade

Caso tenha selecionado **TERAPIA DE CONTRASTE** será necessário ajustar o tempo de aquecimento inicial, tempo de resfriamento e o tempo de aquecimento final.

# CRIODERMIS® 2.0

Aponte a sua câmera aos QR-Codes abaixo para ter acesso ao treinamento e mais materiais do equipamento.



Assista ao treinamento online do equipamento



Tenha acesso ao manual do equipamento



 @medicalsantbr  medicalsan.com.br

# GUIA RÁPIDO CRIODERMIS® 2.0

## PREPARAR O EQUIPAMENTO

Antes de cada sessão deve-se realizar o ajuste no cabo de força localizado atrás do equipamento, apertando-o para garantir uma boa conexão.

1. Conecte o cabo de alimentação elétrica na parte de trás do Criodermis® e na rede elétrica.
2. Certifique-se de que a área em torno do cabo de alimentação esteja livre.
3. Conecte os aplicadores nas conexões frontais.
4. Ligue seu equipamento.



## USO CORRETO DAS FAIXAS

O Criodermis possui um exclusivo sistema de resfriamento por dissipação de ar, ou seja ao obstruir a saída de ar você interfere na eficiência do aplicador.

Ao acionar o resfriamento as placas emitem um som de circulação de ar, posicione a mão na lateral e parte superior de cada aplicador para verificar a entrada e saída de ar.

### UTILIZE SEMPRE AS ALÇAS DE APOIO

### NÃO COBRIR COM COBERTOR

### NUNCA OBSTRUA AS ENTRADAS E SAÍDAS DE AR DO APLICADOR

## LEIA ANTES DE USAR SEU EQUIPAMENTO INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- ▶ É um procedimento seguro.
  - ▶ Deve ser realizado por profissional capacitado e treinado.
  - ▶ Ambiente DEVE estar entre 20°C e 22°C para o correto funcionamento dos aplicadores.
  - ▶ Manta íntegra e de boa qualidade. OBS.: Nunca reutilizar as mantas
  - ▶ Observar que algumas regiões como parte interna das coxas, costas, flancos e braços, são mais sensíveis ao frio e com menor camada adiposa.
  - ▶ Intervalo entre as sessões de 60 dias, caso contrário pode haver uma resposta inflamatória do organismo.
- ▶ É sugerido o aterramento das tomadas.
  - ▶ Observar se no local há oscilações de energia elétrica (pode danificar o equipamento).
  - ▶ Pode-se fazer associação de ultracavitação e ondas de choque para melhores resultados.
  - ▶ A pele deve estar íntegra e bastante hidratada.
  - ▶ Antes de qualquer sessão é muito importante fazer uma avaliação do paciente.

### Contraindicações:

Pessoas diagnosticadas com doenças causadas pelo frio, como crioglobulinemias, alergia ao frio, hemoglobinúria paroxística noturna, fenômeno de Raynaud. Pessoas com hérnia na região a ser tratada, alergias, lesões, lúpus, grávidas ou que possuem cicatrizes no local.

### SUGESTÃO DE APLICAÇÃO POR PREGA

#### Abdominal e culote:

10mm - 45 a 50min  
20mm - 50 a 60min  
30mm - 60 a 70min  
40mm - 70 a 80min  
50mm - 80 a 90min

#### Flancos, interno de coxa, costas e braços:

10mm - 45 a 50min  
20mm - 50 a 60min  
30mm - 60 a 70min  
40mm - 70 a 80min  
50mm - 80 a 90min

## INSTALAÇÃO

**Fonte:** bivolt automático  
(100-240V / 60Hz)

**Potência de entrada:** 900VA

**Fuzíveis:** 5A ação rápida 250V

**Classe Elétrica:** Classe I

**Proteção Elétrica:** TIPO BF

**Temp. ambiente:** 20°C a 24°C

## CALIBRAÇÃO

O equipamento necessita calibração periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas no seu período de vida útil.

## LIMPEZA

Antes de iniciar o procedimento de limpeza, desligue a chave geral do equipamento para evitar danos permanentes. Realize a limpeza conforme instruções contidas no manual do usuário.

Sugerimos a realização de limpeza semanal para o equipamento e para os aplicadores após cada sessão.

Não submergir o equipamento, seus aplicadores ou cabos em líquidos.

## GARANTIA CRIODERMIS

A garantia do seu Criodermis deve ser acionada via QR Code, dessa forma você terá direito a todo o período de 18 meses de garantia, bem como acesso aos treinamentos.

Escaneie o QR-Code e preencha o formulário para ativar a garantia.

