

ULTRAMED MPT®



A ERA DA
PLENITUDE

MEDICAL SAN®

MONTAGEM


Ao montar o Ultramed MPT®, posicione o gabinete no rack, certificando-se de que os pés do gabinete estão alinhados, para encaixe perfeito.

PREPARO

1. Conecte o cabo de alimentação elétrica na parte traseira do Ultramed MPT® e na rede elétrica. Certifique-se que a área em torno do cabo de alimentação esteja livre.
2. Antes de cada sessão deve-se verificar o ajuste no cabo, apertando-o para garantir uma boa conexão.
3. Ligue o seu equipamento na chave traseira. Desligue essa chave ao final de cada dia.
4. Entre as sessões o equipamento pode ser ligado e desligado no botão ON/OFF.

TELA RETRIL

A tela do Ultramed MPT® possui ajuste de posição, inclinando-a. Ao fazer este ajuste segure o gabinete do equipamento.


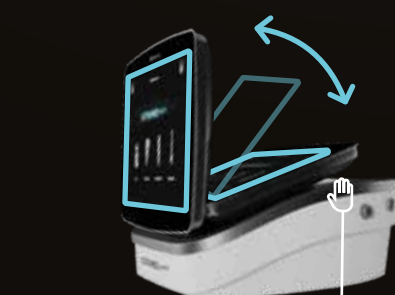


Segure aqui para dar mais estabilidade

SUPORTE PEN

O aplicador PEN possui um suporte para transformá-lo em pistola:


1. Encaixe o cabo do aplicador por dentro da abertura do suporte.
2. Pressione o suporte até que a trava encaixe no aplicador.

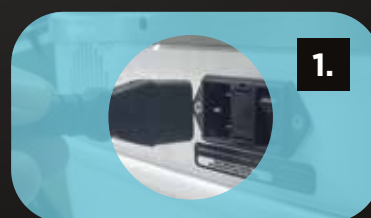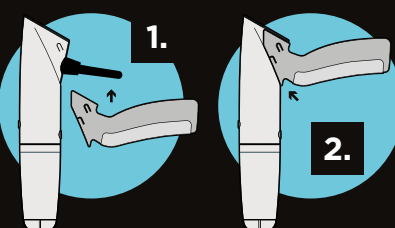

CONECTORES E PEDAL


Cada aplicador do Ultramed MPT® possui sua entrada individual, assim como o pedal.

> PEN MPT, 2D MPT e ÍNTIMO
Conectar: plugue e pressione até a trava de segurança acionar. Desconectar: segure o conector com uma mão próxima a trava, e com a outra mão, gire a trava.

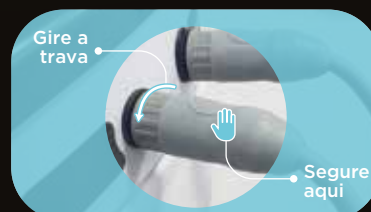


> 9D
Conectar: plugue e pressione o conector até o final. Desconectar: puxe o cabo conector segurando o equipamento com uma das mãos.

> PEDAL
Conectar: plugue e gire a rosca. Desconectar: gire a rosca e puxe o conector segurando o equipamento.

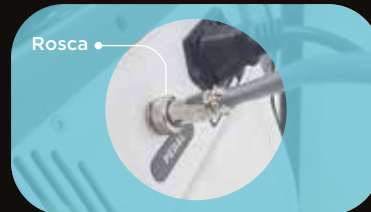


O Ultramed MPT® possui 7 diferentes modos de operação ultra pulse, embarcados em 4 aplicadores e 19 cartuchos exclusivos.

MODOS DE OPERAÇÃO

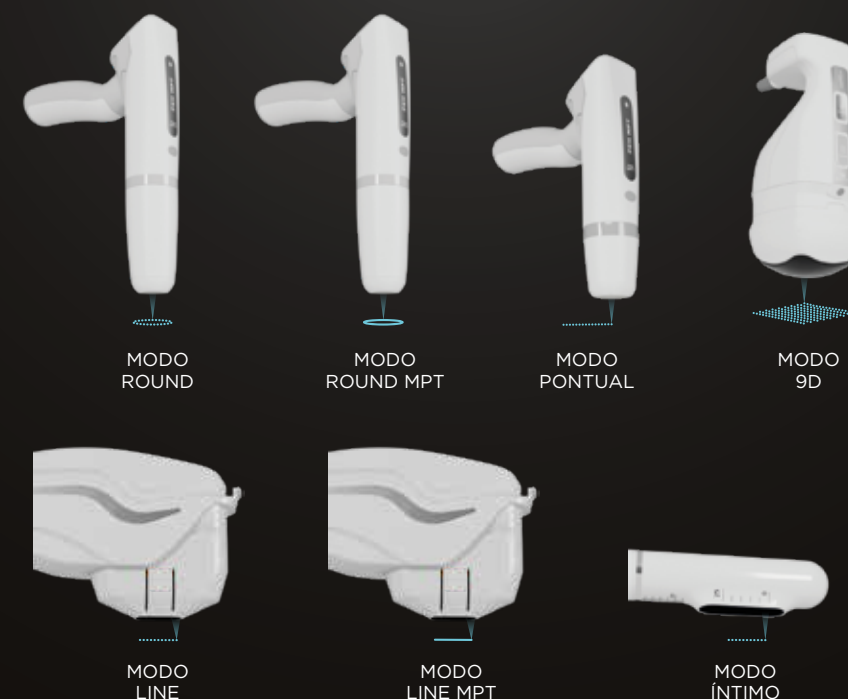

CARTUCHOS

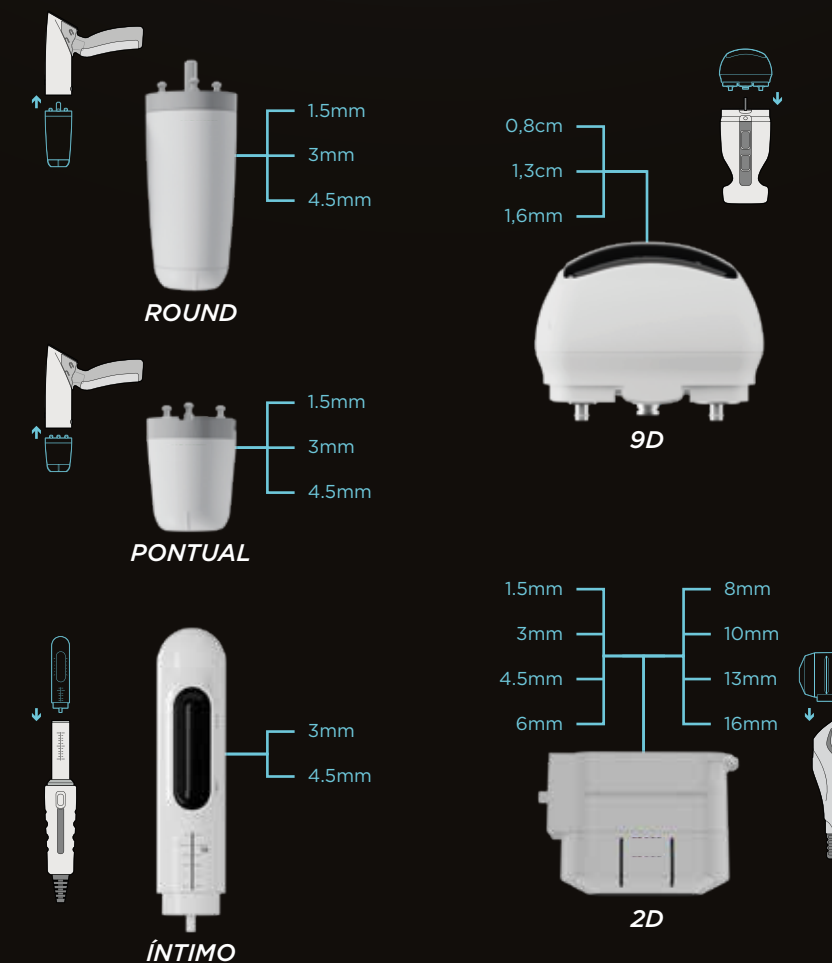

LIMPEZA

- Faça a limpeza do seu equipamento semanalmente e dos aplicadores após cada sessão;
- Tanto o equipamento quanto os aplicadores não devem ser molhados;
- Antes de higienizar desligue o equipamento.

TRANSPORTE

O transporte do Ultramed MPT® deve ser feito em sua embalagem original: equipamento no case, rack na caixa e aplicadores na maleta.


CALIBRAÇÃO

O equipamento necessita manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.

CONTRAINDICAÇÃO

Gestantes, Portador de dispositivos eletrônicos, Erupções cutâneas, Doença auto imune, Alteração de sensibilidade, Câncer, Paciente com trombose, Diabetes. Em uso de anticoagulantes, antiinflamatórios e/ou antibióticos.

Aponte sua câmera aos QR Codes abaixo para ter acesso ao treinamento e o manual do usuário do equipamento.

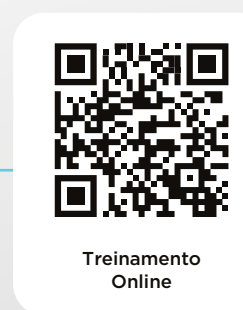

@medicalsantbr




medicalsant.com.br

MEDICAL SAN®


APLICADOR 9D

Aplicador focado na região corporal com 3 opções de cartucho.

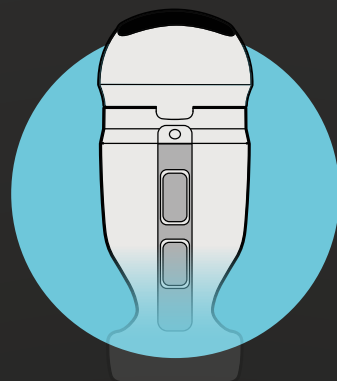

Os parâmetros podem ser configurados de acordo com o protocolo a ser seguido. Note que os parâmetros são diferentes para formatos diferentes de aplicação.

TELA 9D

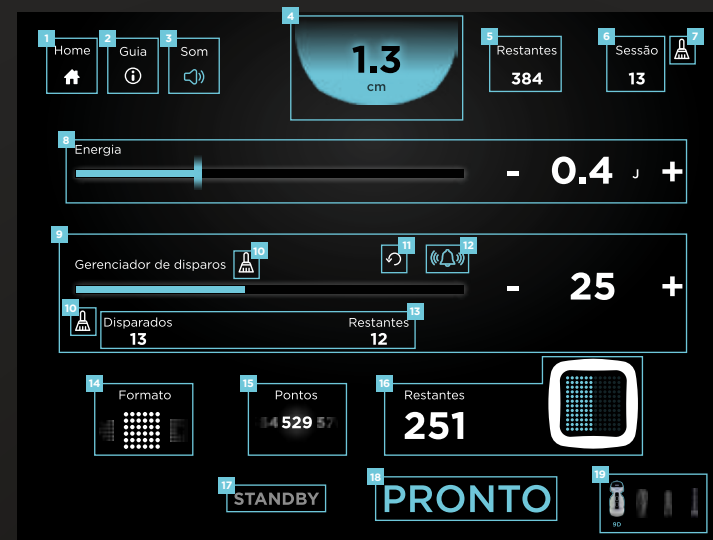

- 1 Volta para a tela inicial
- 2 Guia Rápido do Usuário
- 3 Ativa e desativa o bipe de clique
- 4 Indica o catucho que está sendo utilizado
- 5 Quantidade de disparos restantes no cartucho
- 6 Número de disparos da sessão atual
- 7 Reinicia a contagem de disparos da sessão atual
- 8 Energia emitida em cada disparo (Joules) ajuste por slider ou (-) e (+)
- 9 Gerenciador de disparos ajuste (-) e (+)


APLICADOR 2D MPT

Este aplicador possibilita aplicação facial e corporal com 8 opções de cartucho.



Os parâmetros podem ser configurados de acordo com o protocolo a ser seguido. Note que os parâmetros são diferentes para modo Line e Line MP.


TELA 2D MPT

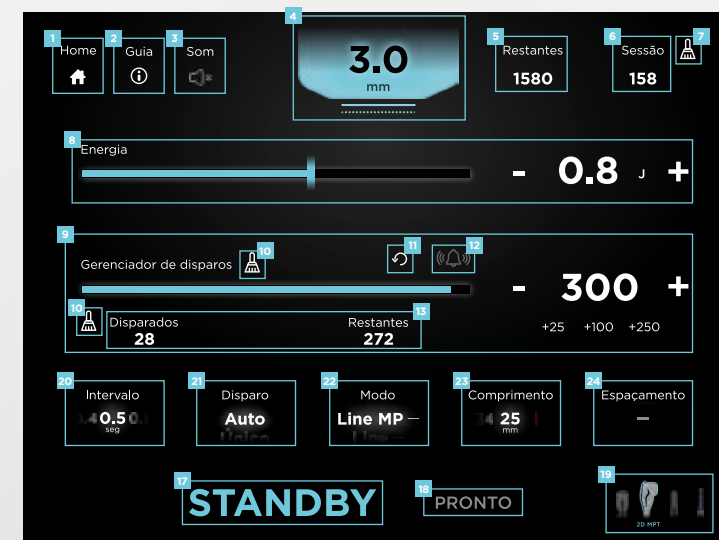

- 10 Zera a contagem de disparos do gerenciador e do contador de disparos da aplicação atual
- 11 Quando ativado reinicia automaticamente a contagem de disparos do gerenciador
- 12 Ativa um sinal sonoro quando os disparos chegam a zero da quantidade escolhida no gerenciador
- 13 Quantidade de disparos feitos e restantes da aplicação atual
- 14 Indica o formato da aplicação ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 15 Indica a quantidade de pontos por disparo ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 16 Quantidade de pontos restantes do disparo atual e representação dos pontos sendo feitos pelo aplicador
- 17 Indica que o aplicador está em espera
- 18 Indica que o aplicador está pronto para uso
- 19 Indica qual o aplicador está em uso


APLICADOR PEN MPT

Este aplicador possibilita aplicação em pequenas áreas faciais e corporais com 6 opções de cartucho.

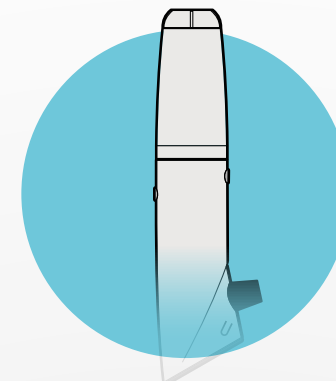

Os parâmetros podem ser configurados de acordo com o protocolo a ser seguido. Note que ao trocar o cartucho para um de outra tecnologia (MP) a tela será modificada.

TELA PEN - PONTUAL

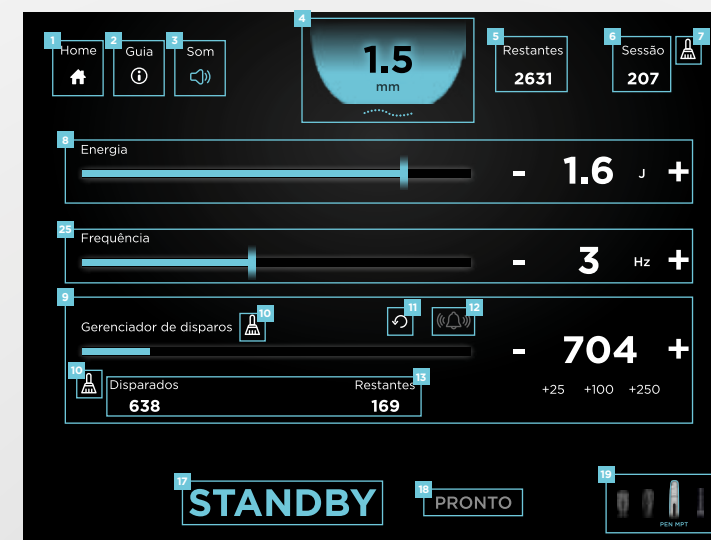


TELA PEN - ROUND



APLICADOR ÍNTIMO

Aplicador focado exclusivamente para região íntima feminina com 2 opções de cartucho.

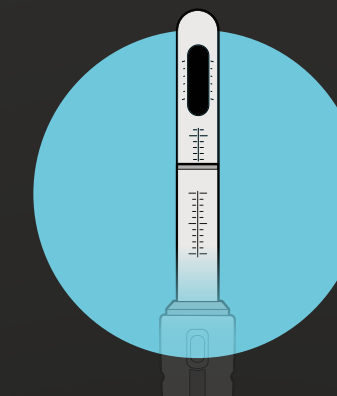

Os parâmetros podem ser configurados de acordo com o protocolo a ser seguido.

TELA ÍNTIMO



- 20 Intervalo entre disparos (segundos) ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 21 Repetição automática ou única ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 22 Modo MP ou modo tradicional ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 23 Comprimento da linha (milímetros) ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 24 Espaço entre pontos (milímetros) ajuste com toque ou arrastando o dedo
- 25 Frequência dos disparos (Hertz)
- 26 Rotação que o cartucho vai exercer (Graus)
- 27 Ângulo entre os disparos (Graus)
- 28 Indica onde o cartucho está disparando