

LIMPEZA:

- Sugerimos que a limpeza do equipamento seja semanal e dos aplicadores a cada sessão;
- Tanto o equipamento quanto os aplicadores não devem ser molhados;
- Desligar o equipamento antes de higienizar.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA:

O equipamento necessita manutenção periódica anual para minimizar desgastes ou corrosões que possam reduzir suas propriedades mecânicas dentro do seu período de vida útil.

INSTALAÇÃO:

Fonte: 100-240V - 60Hz
 Proteção contra choque elétrico: Classe II
 Classificação parte aplicada: TIPO BF

CONTRAINDICAÇÃO:

Cancêr ou metastase; Pele não íntegra; Tecido isquêmico; Trombose venosa; Gestantes; Condições hemorrágicas; Lesões tuberculosas ativas; Alteração de sensibilidade local; Portadores de marca passo cardíaco; Sobre prótese metálicas e de silicone; Processos infecciosos ou inflamatórios agudos; Prótese ou implantes sob o local da aplicação.

Aponte sua câmera aos QR-Codes abaixo para ter acesso ao treinamento e o manual do usuário do equipamento.



Assista ao treinamento online do equipamento



Tenha acesso ao manual do equipamento

GUIA RÁPIDO Andrômeda®

TERMOFREQUÊNCIA PARA ESTÍMULO MULTICAMADA



Veja como iniciar corretamente sua jornada incomparável.

PREPARAR O EQUIPAMENTO

Antes de cada sessão deve-se realizar o ajuste no cabo de força localizado atrás do equipamento, apertando-o para garantir uma boa conexão.



1. Conecte o cabo de alimentação elétrica na parte traseira do Andrômeda® e na rede elétrica. Certifique-se que a área em torno do cabo de alimentação esteja livre.
2. Ligue o seu equipamento na chave traseira.



Ao montar o Andrômeda®, posicione o gabinete no rack, certificando-se de que os pés do gabinete estão alinhados, para encaixe perfeito no rack. O gabinete e o rack do Andrômeda® são transportados em embalagens separadas.

RECURSOS DO ANDRÔMEDA®

Tela de ajuda
Guia Rápido

Indicação de aplicador

Indicação de profundidade

Tempo restante
Tempo configurado

Aumenta e diminui o tempo

Seleção de frequência
Seleciona apenas uma

Potência de 5 a 250W
Configurado na barra e no (+) e (-)

Número do aplicador

Trava de aplicador
Clicado na trava este aplicador não vai funcionar ao clicar Play

Aplicador Motion
Aplicador M
Aplicador G

Aplicador conectado e bloqueado

BLOQUEADO

TRAVADO

Configuração

Desligar

Configuração múltipla



Ao clicar em configuração múltipla todos os aplicadores estacionários que estão plugados serão configurados de forma igual, com os mesmos parâmetros.
O aplicador Motion não é configurado nesta opção, caso ele esteja plugado não será programado nesta opção.

Inicia e pausa a aplicação

O sistema do Andrômeda® foi desenvolvido para simplificar os padrões de configuração dos seus aplicadores.

Todos os parâmetros (tempo, frequência e potência) são configurados em apenas uma tela. Conta com sistema slide (barra), assim como (+) e (-).

Interrompe a aplicação

Configuração

IDIOMA - ID - VERSÃO

Desligar

Ao finalizar a configuração dos aplicadores e iniciar a sessão, todos os aplicadores configurados e funcionando terão uma animação de calor no topo. Esta animação indica o funcionamento do aplicador e a profundidade da frequência selecionada.

SEGURANÇA:



- Certifique-se de que esteja aplicando com uma fina camada de gel no paciente.
- Certifique-se de que o aplicador esteja bem acoplado e com toda a superfície em contato com o paciente.
- Evite usar outro equipamento de correntes ao mesmo tempo.


MANUSEIO DO EQUIPAMENTO:

Este equipamento deve ser utilizado apenas por profissionais devidamente habilitados. É importante que o profissional não manuseie o equipamento sem a devida capacitação.

TELA RETRÁTIL:

A tela do Andrômeda® possui ajuste de altura, inclinando-a. Ao fazer este ajuste segure o gabinete do equipamento.

Segure aqui para dar mais estabilidade

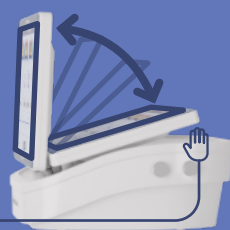

DOSES DE SEGURANÇA

Cada paciente possui uma sensibilidade, portanto utilize doses seguras para não causar nenhum efeito indesejado. Inicie com potência mínima indicada nos protocolos conforme a indicação desejada.

CUIDADOS COM OS APLICADORES

O Aplicador Motion do Andrômeda® deve ser encaixado com segurança, observando a posição correta de entrada do transdutor.

Em caso de queda ou outra ocorrência entre em contato com o Pós-Vendas da Medical San.

APLICADOR MOTION

Este aplicador necessita estar em movimento o tempo todo. Suas ponteiros são intercambiáveis.



TRANSDUTOR FACIAL

Indicado para região facial e áreas pequenas.



TRANSDUTOR ÍNTIMO

Indicado apenas para área íntima feminina.



APLICADOR G

Indicado para grandes áreas corporais.
Ex. Barriga, costas (...)



APLICADOR M

Indicado para áreas corporais menores.
Ex. Braços (...)



APLICADOR G

Indicado para região corporal em geral.



CONFIGURANDO O ANDRÔMEDA®

POSIÇÃO DOS APLICADORES

Cada aplicador possui seu número abaixo da área de configuração, este número coincide com o número da saída, portanto preste bem atenção em qual saída está plugado o aplicador antes de acoplar ao paciente.



Note que o desenho abaixo do número indica a posição do aplicador na tela



Esquerda 1 e 2 | Direita 3 e 4

Posição dos adesivos colados ao lado da saída para indicar qual é o número da saída.

Agora que você já entendeu as funcionalidades do Andrômeda® e quais saídas correspondem ao aplicador na tela, vamos te mostrar como é fácil configurar os aplicadores neste equipamento.


Note que existem duas formas de configurar os aplicadores do Andrômeda:

- Separadamente
- Todos iguais

APLICADORES COM CONFIGURAÇÃO DIFERENTE

Com os aplicadores plugados, inicie a configuração conforme abaixo.


1. Configure o Tempo total de sessão do aplicador.

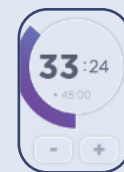

2. Configure a frequência de trabalho do aplicador.



3. Configure a potência de aplicação.

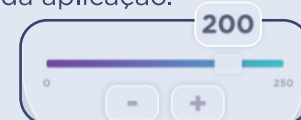

Configure os outros aplicadores conforme seu protocolo. Em seguida dê Play para iniciar a sessão.



A sessão pode ser pausada ou encerrada, mas note que ao encerrar a configuração voltará ao parâmetro inicial.

APLICADORES COM CONFIGURAÇÃO IGUAL

Com os aplicadores plugados, clique no botão de configuração multipla.



Nesta modalidade todos os aplicadores são configurados de uma vez só e com os mesmos parâmetros, conforme indica a explicação na página ao lado.

Ao clicar em SALVAR todos os aplicadores terão o mesmo parâmetro. Se você pretende usar o Aplicador Motion será necessário configurá-lo.